

New



軽い力で曲がる  
やわらかい  
ペッサリー誕生



### 産婦人科医が開発

明理会東京大和病院  
病院長 明樂重夫 先生

## A 型

シリコーン樹脂製



### シリコーン樹脂製

患者さまの体形を考慮し、柔軟性を持たせたシリコーン樹脂製。ペッサリー形状が膣の形に応じて変形するため、体への負担を減らすことができ、脱落もしにくくなります。


※大きさにより硬さを変えています。



### 着脱しやすい ハンドル付きリング


ハンドルにより、自己管理方式・医師管理方式ともに着脱が容易になります。

## 装着イメージ

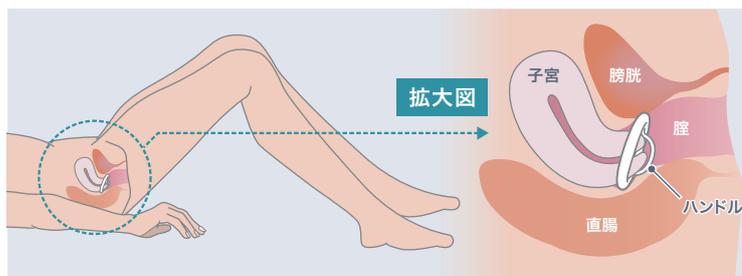


- 前腔円蓋と後腔円蓋の間に装着することで、膀胱下垂を矯正し、子宮頸部の位置を正常に近づけます。
- 取り出しやすいよう、ハンドルが腔口側にくるよう装着します。


## 挿入方法

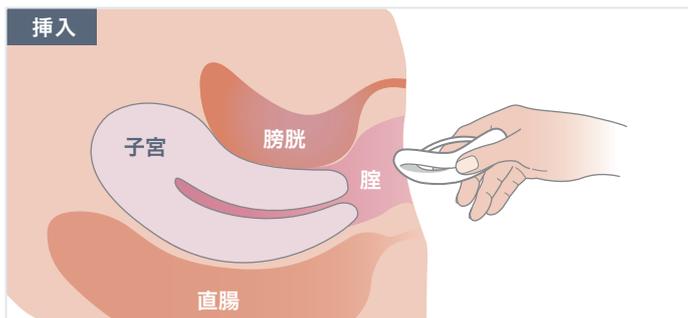


ハンドルが内側になるように持ち、指でペッサリーをイラストのような形にします。

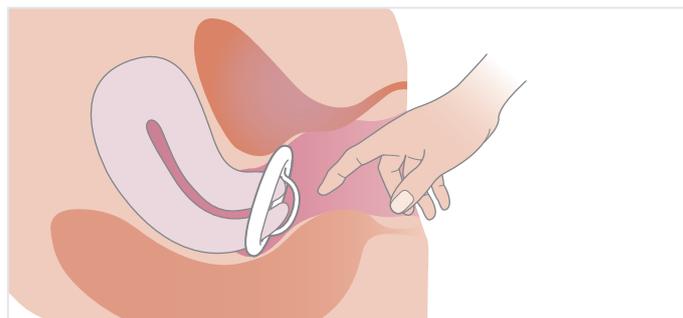

腔口に当てて腔内へ挿入します。前腔円蓋と後腔円蓋の間に置くように装着し、リング直腸側をしっかり後腔円蓋に押し込みます。

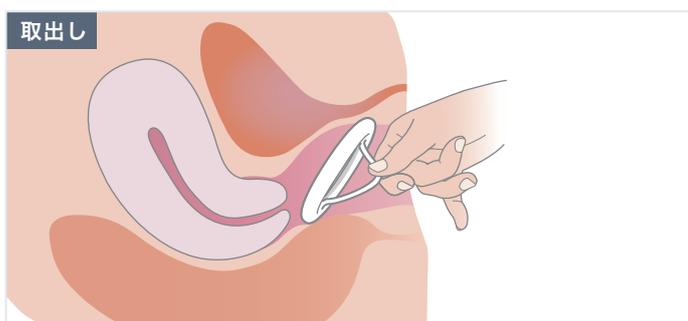

指でハンドルを滑らせるように引きます。

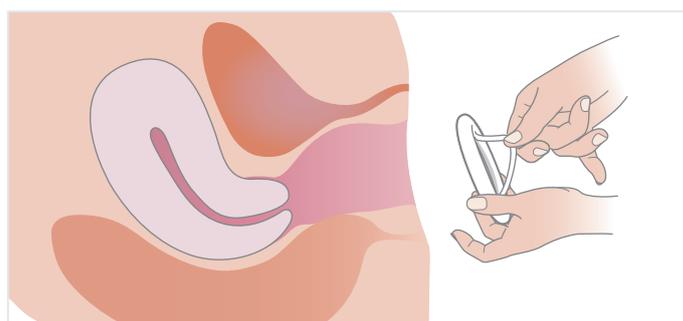

もう片方の手を添えてゆっくり取り出します。

### 仕様・規格

品番	サイズ	包装単位
KRP-55 - A	Φ 55 mm Atype	1 pcs/pack
KRP-60 - A	Φ 60 mm Atype	
KRP-65 - A	Φ 65 mm Atype	
KRP-70 - A	Φ 70 mm Atype	
KRP-75 - A	Φ 75 mm Atype	
KRP-80 - A	Φ 80 mm Atype	

### 使用上の注意

#### ○重要な基本的注意

1. 本品は未滅菌のため、滅菌を施した上で使用すること。
2. 本品の挿入と取り出しは訓練を受けた医師・看護師の下で行うこと。
3. 本品のサイズは医師の診断に基づいて決定すること。

#### ○不具合・有害事象

1. 腔壁の損傷 / 2. 自然脱去 / 3. 出血 / 4. 腸への圧迫・貫通

キタザトリングペッサリー 製品サイトはこちら

キタザトリングペッサリー



<http://www.kitazato-pessary.com/>



**KITAZATO**

製造販売元: 株式会社 北里コーポレーション

本社: 〒416-0932 静岡県富士市柳島 100番地 10

東京オフィス: 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目 1番地 8号

販売元: 株式会社 北里ヘルスケア

【お問合せ先】

Mail [info\\_healthcare@kitazato.co.jp](mailto:info_healthcare@kitazato.co.jp)

Tel. 0545-66-2202