

New

やわらかい
アーチ形状の
ペッサリー誕生




New



A 型

シリコーン樹脂製

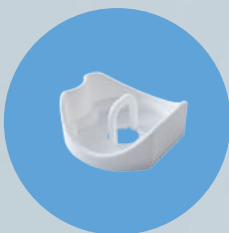

K 型

シリコーン樹脂製



O 型

ナイロン樹脂製



M 型

ナイロン樹脂製



リング

シリコーン樹脂製

患者さまの体形を考慮し、柔軟性を持たせたシリコーン樹脂製。指をかけられるリング付きで、容易に着脱できます。




これまでにないアーチ型

アーチ型の形状により腹圧を前後に分散することができ、腹圧性尿失禁の防止や一部の切迫性尿失禁の改善が期待できます。


装着イメージ

横断面

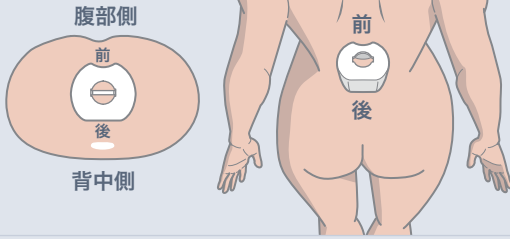

前面は尿道を支持するためのへこみがある曲面で、後面は直腸を支持するために平面となっています。


矢状断面

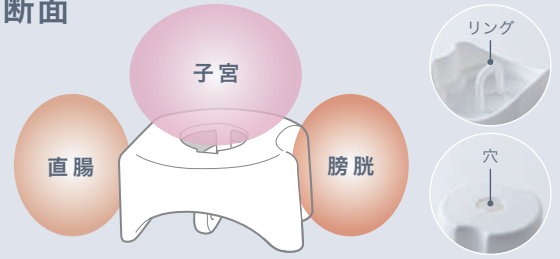


上部は下りてきた子宮を支持するために平面となっており、分泌物を排泄するために小さな穴が開いています。また、下部には取り出す際に指をひっかけるためのリングがついています。

挿入方法


挿入

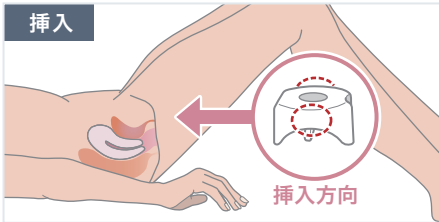

赤まる点線部分を人差し指と親指で握り、側面のアーチ部分が重なるように折り曲げます。

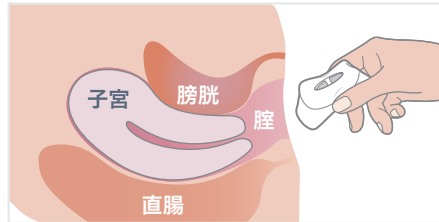


平面側からペッサリーを膣口に当てて膣内へ押し込みます。

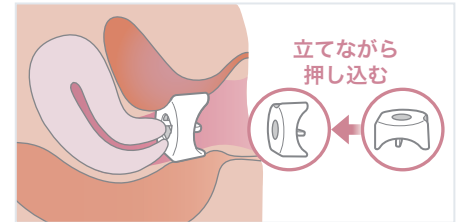


向きを縦に変えながら、子宮口に押し込みます。

取出し

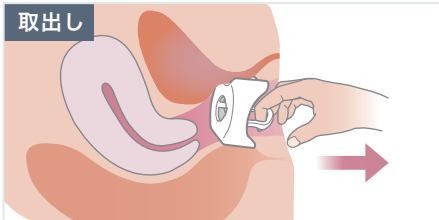

指をリングに引っ掛けて、滑らせるように引き抜きます。

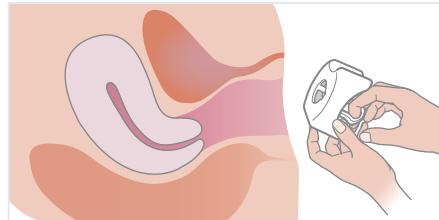

もう片方の手を添えてゆっくり取り出します。

仕様・規格

品番	サイズ	包装単位
KRP-60-K	Φ 60 mm Ktype	1pcs/pack
KRP-65-K	Φ 65 mm Ktype	
KRP-70-K	Φ 70 mm Ktype	
KRP-75-K	Φ 75 mm Ktype	
KRP-80-K	Φ 80 mm Ktype	

使用上の注意

○重要な基本的注意

1. 本品は未滅菌のため、滅菌を施した上で使用すること。
2. 本品の挿入と取り出しは訓練を受けた医師・看護師の下で行うこと。
3. 本品のサイズは医師の診断に基づいて決定すること。

○不具合・有害事象

1. 腔壁の損傷 / 2. 自然脱去 / 3. 出血 / 4. 腸への圧迫・貫通

キタザトリングペッサリー 製品サイトはこちら

キタザトリングペッサリー



<http://www.kitazato-pessary.com/>



KITAZATO

製造販売元: 株式会社 北里コーポレーション

本社: 〒416-0932 静岡県富士市柳島 100番地 10

東京オフィス: 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目 1番地 8号

販売元: 株式会社 北里ヘルスケア

【お問合せ先】

Mail info_healthcare@kitazato.co.jp

Tel. 0545-66-2202