


キタザト骨盤底サポーター

ベルト調節可能なショーツ型タイプ

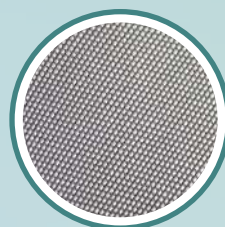

BLACK

通気性の良いメッシュ素材



BEIGE

防臭効果のあるクロッチ部分
綿混合素材



※本製品をご使用前に必ず添付文書をお読みいただき正しくご使用ください。
また必要な時に読めるよう保管ください。

使用説明

- キタザト骨盤底サポーターは下着の上から着用する、ショーツタイプのサポーターです。
- 下垂・脱出する臓器を正常な位置に保持することが可能です。
- 腹部側と背面側のマジックテープで、簡単に調整可能です。

カラー：ブラック



主材：ナイロン

カラー：ベージュ





主材：綿


ご使用手順

01 臓器が出ている場合には体内に戻す


02 下着の上から着用する

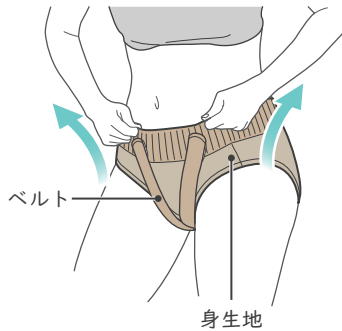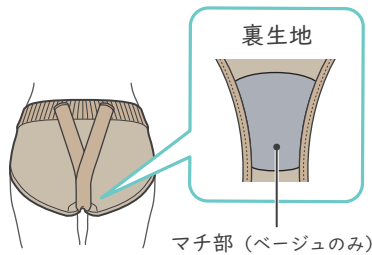


04 履いた後は、股間が圧迫されていることを確認する

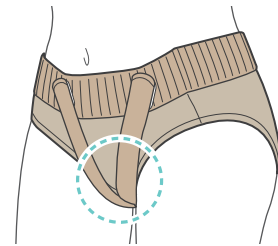

03 お腹側と背中側のマジックテープで調整する

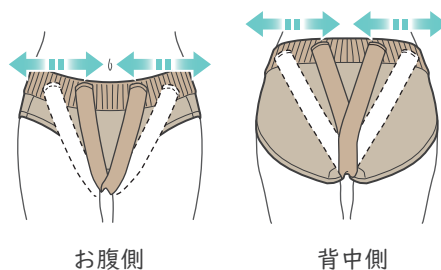

05 最後にベルトが固定されていることを確認する

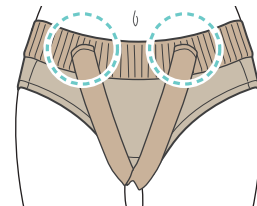

※使用後はお住まいの自治体のルールに従い、廃棄してください。

仕様・規格

品番	サイズ	素材
SPS BG-M	M H : 87 ~ 95	身生地：綿 88%・ポリウレタン 12% マチ部：綿 70%・レーヨン 30%
SPS BG-L	L H : 92 ~ 100	ベルト：綿 31%・ナイロン 30%・ポリエステル 23%・レーヨン 10%・ポリウレタン 6%
SPS BG-LL	LL H : 97 ~ 105	
SPS BL-M	M H : 87 ~ 95	身生地：ナイロン 83%・ポリウレタン 17%
SPS BL-L	L H : 92 ~ 100	ベルト：綿 31%・ナイロン 30%・ポリエステル 23%・レーヨン 10%・ポリウレタン 6%
SPS BL-LL	LL H : 97 ~ 105	

使用上のご注意

- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・本品を使用中に皮膚などに異常が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。
- ・お洗濯の際にはネットをご使用ください。
- ・塩素系漂白剤、タンブラーのご使用はお避けください。



KITAZATO®

製造販売元：株式会社 北里コーポレーション

本社：〒416-0932 静岡県富士市柳島 100番地 10

東京オフィス：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目 1番地 8号

販売元：株式会社 北里ヘルスケア

URL <https://www.kitazato-healthcare.com/>

Mail info_healthcare@kitazato.co.jp

Tel. 0545-66-2202

Copyright© Kitazato Corporation All Rights Reserved. | v.4.1 2024.11.15